



LA *CLARA* ELECCIÓN
PARA IMPLANTES NO
VALVULADOS




FLEXIBILIDAD PARA ADAPTARSE A LAS NECESIDADES DE CADA PACIENTE

2 TAMAÑOS DE PLACA & 2 TAMAÑOS DE TUBO = 4 OPCIONES EN 1 DISPOSITIVO

2 TAMAÑOS DE PLACA

250 mm²

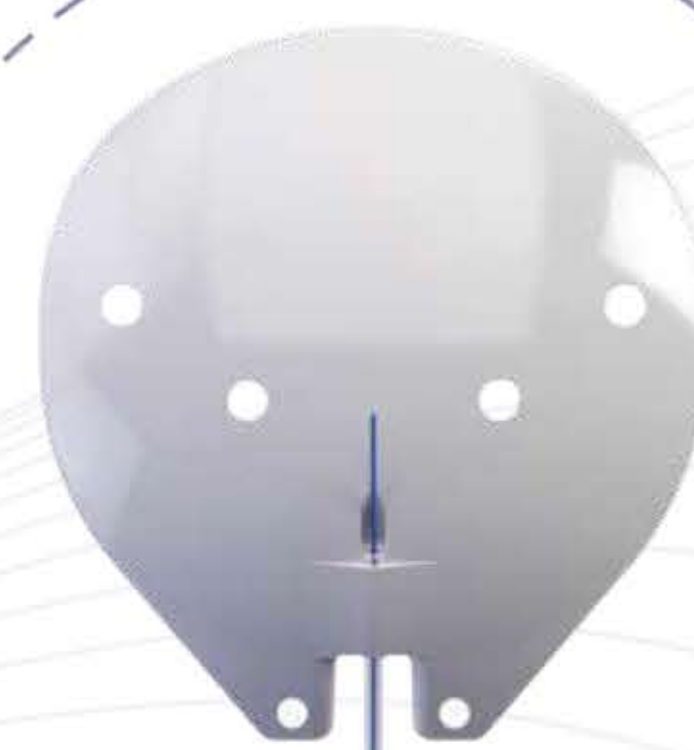

350 mm²




PRESENTANDO

Ahmed
CLEARPATH® ST

MODELO	TUBO DI	TUBO DE
ACP	305 µm	635 µm
ACP ST	127 µm	457 µm

DI -Diámetro Interior, DE Diámetro Exterior

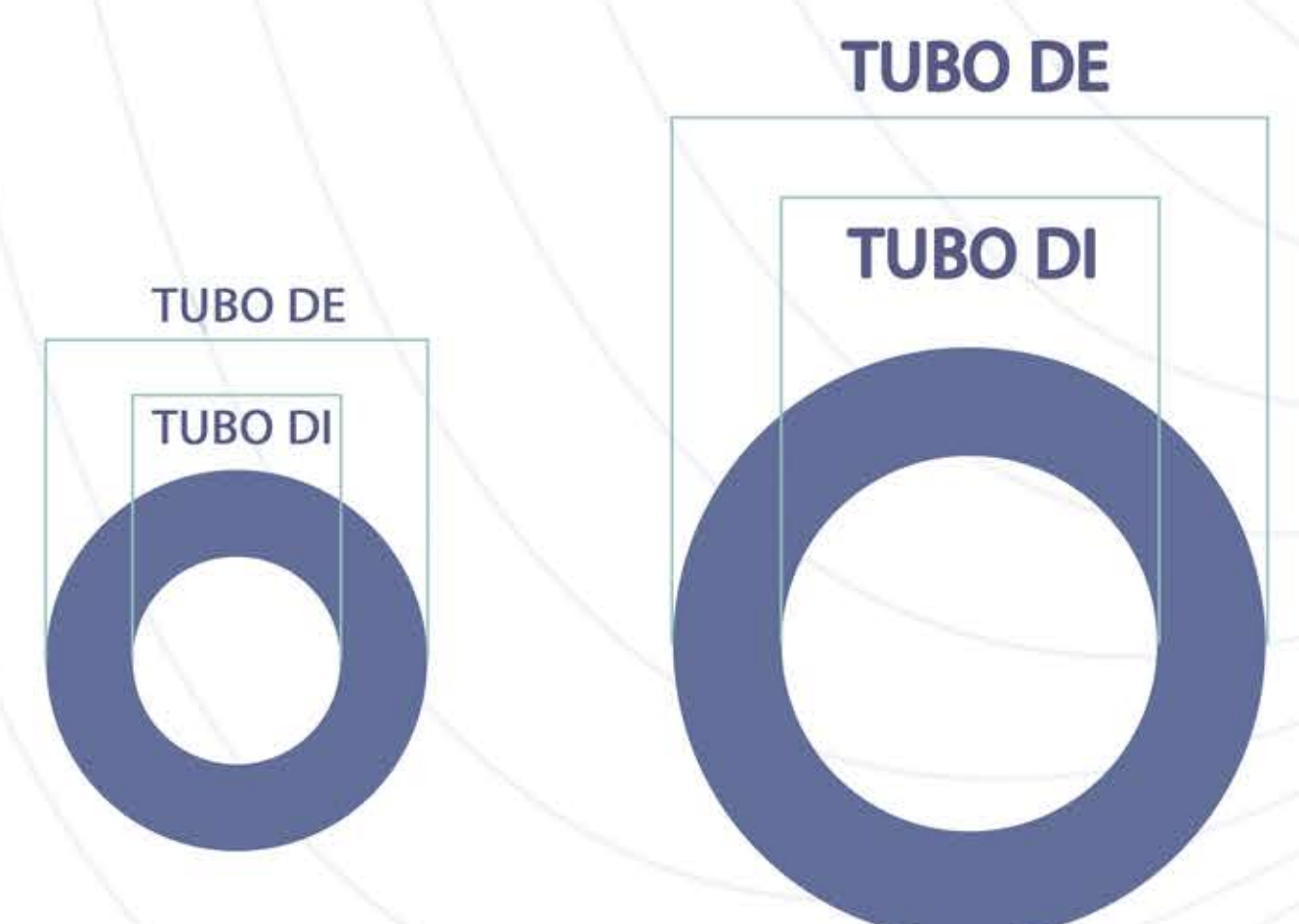

¿POR QUÉ AHMED CLEARPATH®?

ATENDER LAS DEMANDAS DEL MERCADO CON UNA MARCA DE CONFIANZA

DISEÑO DE-PLACA OPTIMIZADO

Permite una verdadera implantación en un solo cuadrante y evita aislamiento del músculo recto (modelo 250). El diseño con alas (modelo 350) evita los puntos de inserción del músculo recto.

MATERIAL FLEXIBLE ADAPTABLE AL GLOBO

Permite que el implante en forma de globo proporcione un ajuste más natural al tiempo que proporciona una ampolla difusa y baja.

PAQUETE TODO INCLUIDO

Incluye un ripcord y una aguja para la vía escleral preempaquetados .

SUTURA RIPCORDER PRE-ENHEBRADA

Permite opciones para el manejo de la PIO después de la cirugía.



OJALES DE FIJACIÓN

Acceso más fácil para la sutura de la placa y permite una colocación más posterior de la placa.

MÚLTIPLES OPCIONES DE TAMAÑO DE TUBO

Aborda las necesidades de todos los cirujanos y pacientes.

Basándome en mi experiencia inicial con los implantes Ahmed ClearPath ST (ACP ST) y PAUL, considero que el ACP ST ofrece mayor conveniencia por su sutura ripcord prolene 6-0 preenroscada y la aguja incluida para la vía escleral. Su capacidad para implantarse sin pasar por debajo del músculo, es una gran ventaja tanto para los cirujanos como para los pacientes. Los orificios de sutura más anteriores simplifican la fijación, y el tubo ligeramente más rígido facilita la inserción a través de un túnel escleral largo. Los primeros resultados muestran una PIO desde el primer día en torno a decena.

Dr. Gabriel Lazcano



Ahmed
CLEARPATH®

CONFIANZA EN LOS RESULTADOS DEL PACIENTE

AHMED CLEARPATH VS IMPLANTE BAERVELDT¹

Características Base	Ahmed ClearPath	Baerveldt
PIO al inicio, mmHg	28.5	28.2
PIO en el seguimiento, mmHg	12.8 (55.1% reducción)	12.8 (54.6% reducción)
Medicación media al inicio, #	3.4	3.7
Medicación media en seguimiento, #	2.0 (41.2% reducción)	2.6 (29.7% reducción)

Ahmed ClearPath demostró una reducción significativamente mayor en la medicación en comparación con Baerveldt.

MORFOLOGÍA DE LA AMPOLLA DE DISPOSITIVOS DE DRENAJE PARA GLAUCOMA EN RESONANCIA MAGNÉTICA²

	AGV	BGI	PGI	ACP
Ojos, N	7	5	16	8
PIO al inicio, mmHg (m±SD)	23±11	27.2±8.4	33.2±12.6	25±9.1
PIO a 12 meses, mmHg (m±SD)	17±7.1	12.8±2.8	16.5±4.4	11.6±4.0
Medicamentos tópicos al inicio, N (m±DE)	3.3±0.8	3.0±0.0	2.7±1.1	2.9±1.4
Medicamentos tópicos a 12 meses, N (m±DE)	1.6±1.3	0.6±0.9	1.3±1.2	0.1±0.5

Ahmed ClearPath logra la mayor reducción de la presión intraocular (PIO) y del uso de medicamentos a los 12 meses, superando a otros dispositivos de drenaje del glaucoma (DDG).



El ClearPath Modelo 250 es un dispositivo más pequeño que permite una verdadera implantación en un solo cuadrante, que se ubica entre los músculos rectos, lo que facilita su colocación. La ampolla discreta que forma no solo es visualmente atractiva, sino también funcional.

-Dr. Tosin Smith



LA CLARA ELECCIÓN *DDG SIN VÁLVULA*

MARCA	Tipo DDG	Material Placa	Opciones Tamaño Placa	Opción Tubo Pequeño	Placa Flexible para técnicas de incisión pequeña	Dispositivo de cuadrante único	Fijación anterior Ojales de sutura	Ripcord pre-enhebrado incluido	Aguja para la vía escleral Incluida
Ahmed® ClearPath (ACP & ACP ST) ^{3,4}	Sin Válvula	Silicona Impregnada con Bario de Grado Médico	250mm ² 350mm ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PAUL® Glaucoma Implant (PGI) ⁵	Sin Válvula	Silicona de Grado Médico	342.1mm ²	✓	?	X	X	X	X
Baerveldt® Glaucoma Implant (BGI) ⁶	Sin Válvula	Silicona Impregnada con Bario de Grado Médico	250mm ² 350mm ²	X	X	X	X	X	X
Molteno3® Glaucoma Implant ⁷	Sin Válvula	Silicona de Grado Médico	185mm ² 245mm ²	X	?	✓	✓	X	X
Aurolab® Aqueous Drainage Implant (AADI) ⁸	Sin Válvula	Silicona Impregnada con Bario de Grado Médico	350mm ²	X	X	X	X	X	X
eyePlate Glaucoma Drainage Device ⁹	Sin Válvula	Silicona de Grado Médico	200mm ² 300mm ²	X	?	✓	X	X	X




Ahmed ClearPath permite una técnica de incisión pequeña gracias a su material de silicona maleable que se despliega naturalmente con una curvatura que se ajusta a la esclerótica.

-Dr. Inder Paul Singh



Listo para
Iniciar?

Únase a LEARN, nuestra plataforma de capacitación en línea, para obtener acceso instantáneo a módulos de capacitación y formación sobre productos.

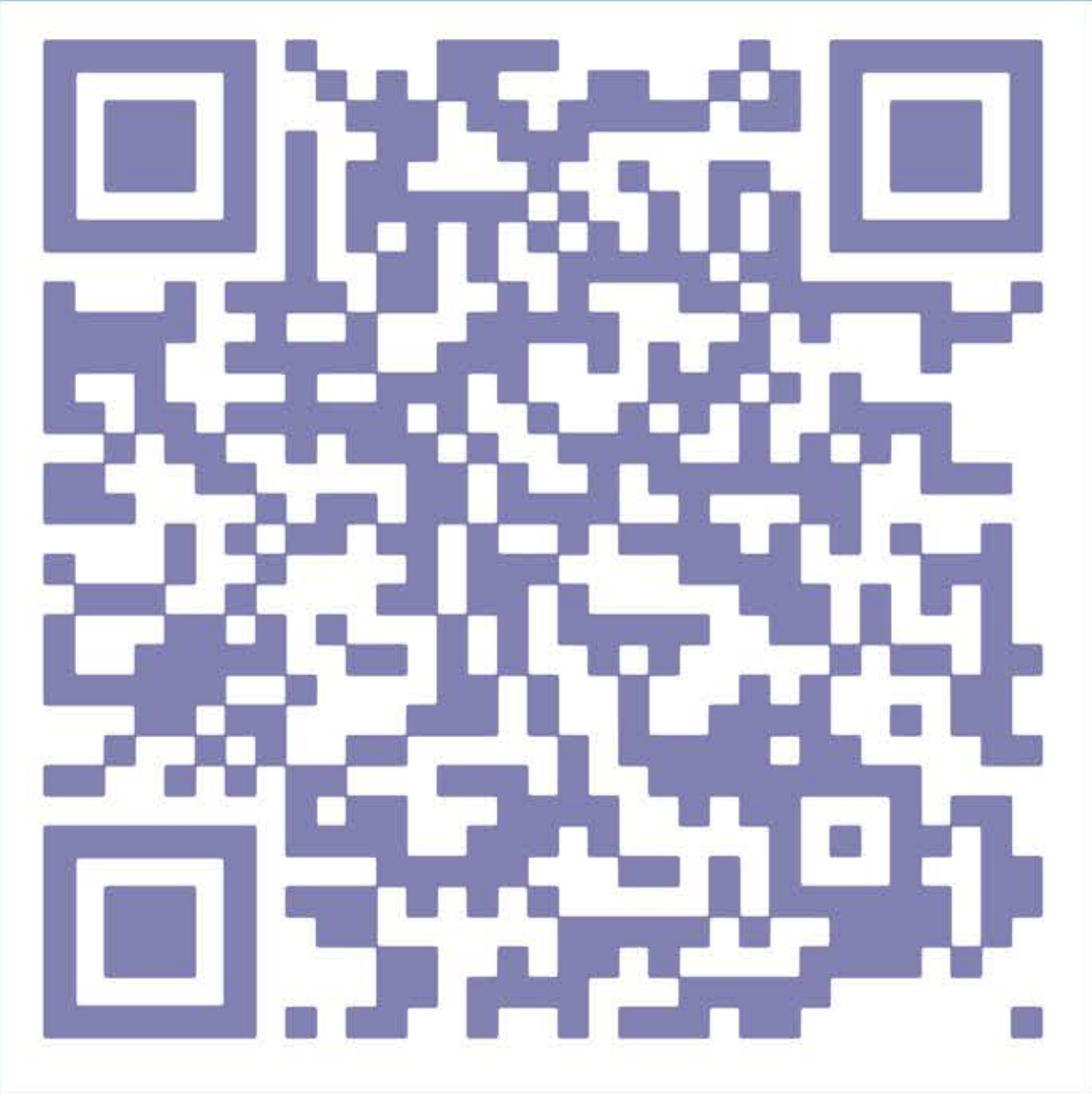

Referencias -

1. Shalaby, W. S., Reddy, R., Wummer, B., Huang, P., Lee, D., Razeghinejad, R., & Pro, M. J. (2024). Ahmed ClearPath vs. Baerveldt Glaucoma Implant: A Retrospective Noninferiority Comparative Study. *Ophthalmology*, 7(3), 251–259. <https://doi.org/10.1016/j.ogla.2023.12.006>

2. Correia Barão, R., Berhanu, D., Bernardo Matos, D., Barata, A. D., Sousa, R., & Abegão Pinto, L. (2023). Bleb morphology of glaucoma drainage devices on magnetic resonance imaging. *Acta ophthalmologica*, 101(7), 789–796. <https://doi.org/10.1111/aos.15668>

3. New World Medical. (2023, February). The Ahmed ClearPath Glaucoma Drainage Device IFU. https://www.newworldmedical.com/wp-content/uploads/2023/07/50-0184_IFU_ACP_ARTWORK_MULTILINGUAL_WEB_VERSION.pdf

4. New World Medical. (2024, July). Ahmed ClearPath ST Glaucoma Drainage Device IFU. <https://www.learn.newworldmedical.com/wp-content/uploads/2025/01/50-0612-IFU-CLEARPATH-ACP-ST-ARTWORK.pdf>

5. Advanced Ophthalmic Innovations, AOI. (2024, December). Paul Glaucoma Implant IFU. <https://aoi.sg/wp-content/uploads/2025/01/Current-GD1-3-004-11.pdf>

6. Johnson & Johnson Vision. Baerveldt Glaucoma Implants. Johnson & Johnson Vision. <https://www.jnjvisionpro.com/en-us/products/baerveldt-glaucoma-implants/>

7. Molteno3®. Molteno3® Glaucoma Drainage Device. <https://glaucoma-molteno.com/physicians/molteno3/>

8. Aurolab. (2017). AADI Description and Instructions for Use. www.iogen.fi/wp-content/uploads/2017/06/aurolab-aadi-description-and-instructions-for-use.pdf

9. Rheon Medical. Instructions for Use: eyePlate Glaucoma Drainage Implant. (Oct. 2024). <https://rheonmedical.com/wp-content/uploads/2024/11/2040-2-1-Instructions-for-Use-eyePlate.pdf>

